

9mg/3 ml - 0,3% Sodio Ialuronato

Soluzione da nebulizzare per somministrazione aerosolica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'acido ialuronico è universalmente riconosciuto come il principale componente molecolare della matrice extracellulare. Nell'apparato respiratorio è sintetizzato dai fibroblasti del rinofaringe e dell'interstizio polmonare, dalle ghiandole della sottomucosa tracheo-bronchiale, e dalle goblet cell dell'epitelio di rivestimento che lo aggiungono al muco che riveste e protegge le vie respiratorie. Grazie a questa sua distribuzione, l'acido ialuronico svolge un ruolo centrale nella fisiologia respiratoria intervenendo in molteplici meccanismi omeostatici.

L'acido ialuronico somministrato per via aerosolica penetra rapidamente e si integra nell'interstizio polmonare prevenendo la diffusione delle macromolecole e regolando la migrazione delle popolazioni cellulari che intervengono nelle reazioni flogistiche. La sua elevata idrofilia consente inoltre di idratare l'intero albero respiratorio facilitando la rimozione di cataboliti ed allergeni.

Grazie alla sua capacità di integrarsi nella componente glicoproteica che riveste la mucosa pre-respiratoria interviene nella regolazione della clearance muco ciliare interferendo con potenziali fattori perturbanti allergenici o infiammatori, ambientali o endogeni.

INDICAZIONI

L'uso di YABRO® è indicato come coadiuvante nel ripristino e mantenimento delle condizioni fisiologiche dell'interstizio e delle mucose polmonari alterati nelle flogosi bronchiali croniche, come ad esempio asma e bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), ma non sostituisce la terapia farmacologica prescritta dal proprio Medico.

YABRO® inoltre è indicato nel trattamento coadiuvante delle affezioni delle alte vie respiratorie quali: tonsilliti, laringiti, faringiti, rinofaringiti, sinusiti, riniti, tracheiti, sia in fase acuta che cronica; raucedine; flogosi delle corde vocali con e senza disфония; nel migliorare il ripristino della funzionalità mucosale nella fase post-operatoria degli interventi endonasali. YABRO® si aggiunge e non sostituisce altri trattamenti terapeutici eventualmente prescritti ai pazienti.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

YABRO® è una soluzione sterile da nebulizzare. La confezione contiene 10 fiale monouso da 3 ml.

COMPOSIZIONE

Ogni fiala da 3 ml contiene: sodio ialuronato (Acido ialuronico Sale Sodico), acqua, sodio cloruro.

FREQUENZA D'USO

Si consiglia 1 fiala da 3 ml al giorno come coadiuvante nei periodi di diminuita funzionalità respiratoria.

Nelle affezioni delle alte vie respiratorie, nelle flogosi delle corde vocali e nel migliorare il ripristino funzionale post-operatorio endonasale si consiglia 1 fiala da 3 ml una o due volte al giorno secondo consiglio medico, per un tempo non inferiore alle 2 settimane.

COME SI USA

Nel trattamento delle flogosi bronchiali croniche e delle corde vocali:

1. Aprire la fiala monodose spezzandone il collo lungo la linea evidenziata;
2. Versare il contenuto della fiala nell'ampolla del nebulizzatore;
3. Nebulizzare il contenuto di una fiala tramite un apposito apparecchio per aerosolterapia;
4. Si consiglia di utilizzare apparecchi dotati di compressore in grado di garantire un'elevata capacità di flusso in uscita (valore indicativo di almeno 0,40 ml/minuto);
5. Non utilizzare apparecchi ad ultrasuoni;
6. In funzione del tipo di apparecchio usato, la completa nebulizzazione di una fiala può richiedere da 15 fino a 40 minuti.

Come coadiuvante delle affezioni delle alte vie respiratorie e nel ripristino della funzionalità mucosale nella fase post-operatoria degli interventi endonasali:

1. Aprire la fiala monodose spezzandone il collo lungo la linea evidenziata;
2. Versare il contenuto della fiala di YABRO® e del flaconcino di soluzione fisiologica nell'ampolla del nebulizzatore;
3. Nebulizzare la soluzione tramite un apposito apparecchio per aerosolterapia. Si consiglia di dotare l'apparecchio aerosol dell'opportuno accessorio di doccia nasale;
4. Si consiglia di utilizzare apparecchi dotati di compressore in grado di garantire un'elevata capacità di flusso in uscita (valore indicativo di almeno 0,40 ml/minuto);
5. Non utilizzare apparecchi ad ultrasuoni;
6. La nebulizzazione attraverso doccia nasale della fiala di YABRO® unitamente al flaconcino di soluzione fisiologica può richiedere da 30 secondi a 2 minuti.

AVVERTENZE

Non utilizzare YABRO® dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Non utilizzare YABRO® se l'imballaggio è aperto o danneggiato.

Non sterilizzare nuovamente. YABRO® è previsto solo per il monouso.

Non riutilizzare per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

Conservare tra 0° e 25°C. Non congelare.

Una volta aperto YABRO® deve essere utilizzato immediatamente ed eliminato dopo l'uso.

Il fumo compromette l'effetto protettivo dell'acido ialuronico sulla funzionalità alveolare.

YABRO® è un trattamento aggiuntivo e non sostituisce altri trattamenti prescritti dal proprio Medico.

E' opportuno consultare il proprio Medico prima di utilizzare YABRO®.

TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

INTERAZIONI

Non sono note al momento interazioni tra YABRO® ed eventuali terapie concomitanti.

Tuttavia, essendo YABRO® costituito da soluzione fisiologica e acido ialuronico, un costituente naturale dei tessuti umani, tali interazioni sono, in linea di principio, da escludersi.

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

Non sono note al momento controindicazioni all'uso di YABRO®, né sono stati riportati effetti collaterali, tuttavia il prodotto non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità nota al sodio ialuronato o agli altri componenti. Qualora si verificassero effetti indesiderati si consiglia di interrompere il trattamento e consultare il proprio Medico.

DATA ULTIMA REVISIONE FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: Aprile 2014

Anno di certificazione CE: 2010

FABBRICANTE:

IBSA Farmaceutici Italia srl

Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (LO) Italy

E-mail: info@ibsa.it



Temperatura di conservazione



Sterile per asepsi



Monouso



Utilizzare entro il...



Lotto